



пикассо

Независимые
центры рентгено-
диагностики

КАК ОТКРЫТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ В PICASSO VIEWER ПРИ ПОМОЩИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА


picasso-diagnostic.ru

Для партнеров компании «Пикассо» доступен сервис [Личный кабинет](#).

При синхронизации с PicassoViewer данный сервис имеет следующие преимущества:

- Единая база исследований. Не нужно искать снимки на почте. Весь список исследований, отправленных на электронную почту, отображается прямо в программном обеспечении.
- Больше не нужно самостоятельно скачивать исследования. Загрузка происходит автоматически.
- Не требуется работа с архиваторами. Открытие снимка полностью автоматизировано.
- Экономия времени. Открытие снимка по ссылке занимает не более двух минут.
- Запрос на восстановление ссылки на исследование можно отправить прямо из программного обеспечения.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

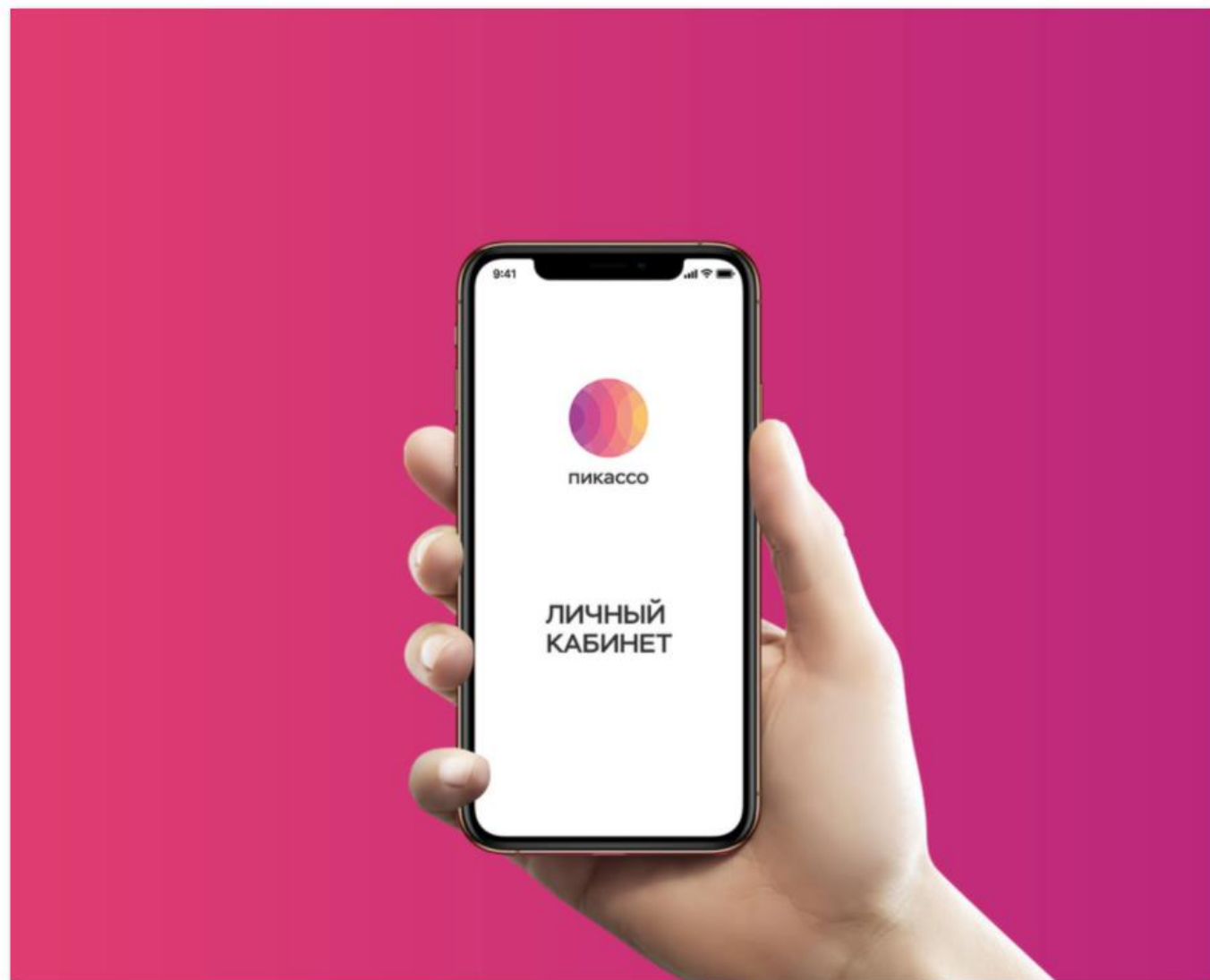


1. Для работы в PicassoViewer при помощи сервиса [Личный кабинет](#) Вам необходима учетная запись в данном сервисе. Зарегистрироваться можно по ссылке ниже (доступно только для партнеров компании).

<https://lk.picasso-diagnostic.ru>


2. Для синхронизации нужно пройти процедуру авторизации в PicassoViewer. Для этого требуется кликнуть по надписи «Авторизоваться».

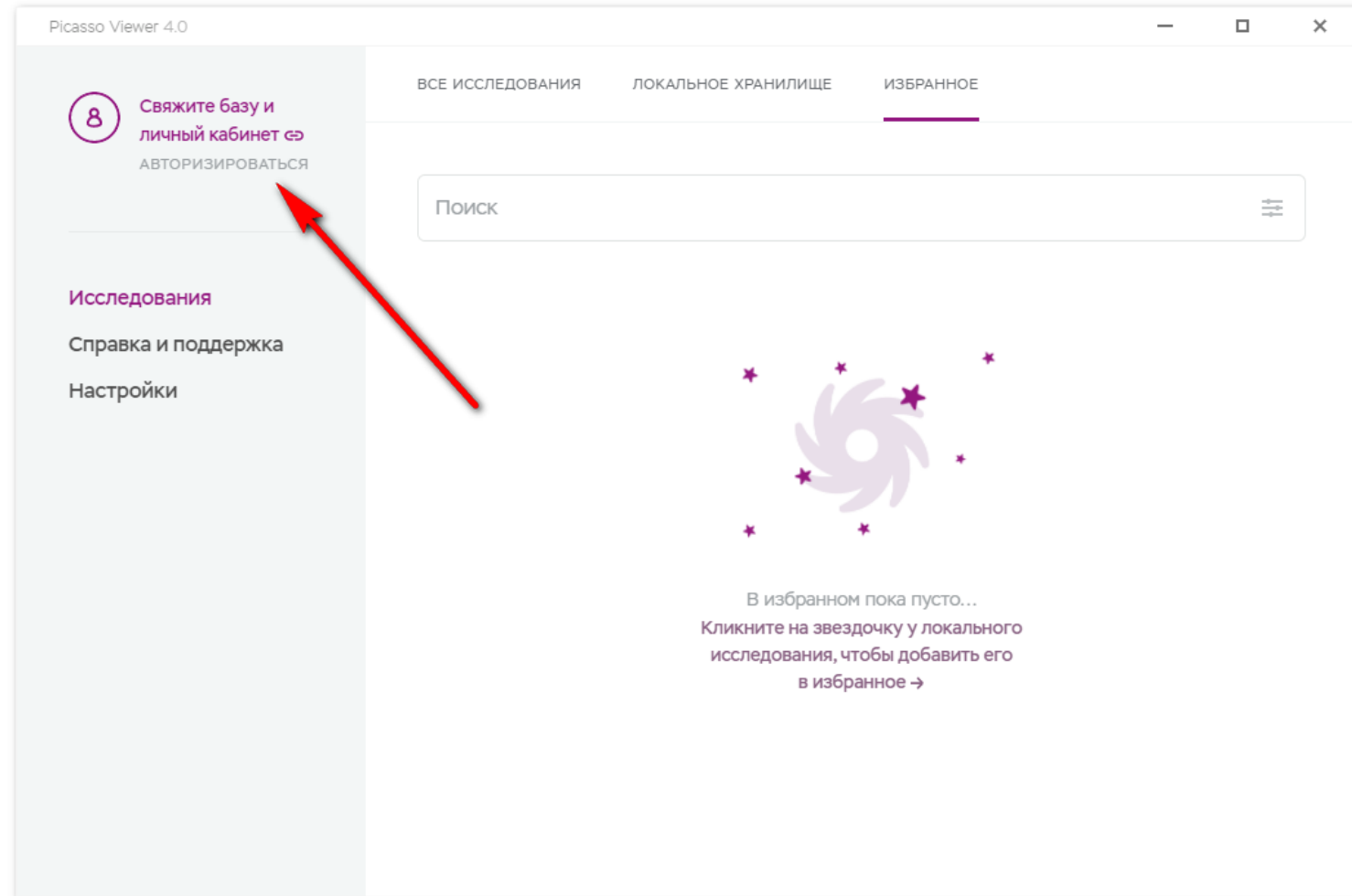

3. Далее нужно ввести регистрационные данные, которые были получены при регистрации в сервисе [Личный кабинет](#), и нажать кнопку «Войти».

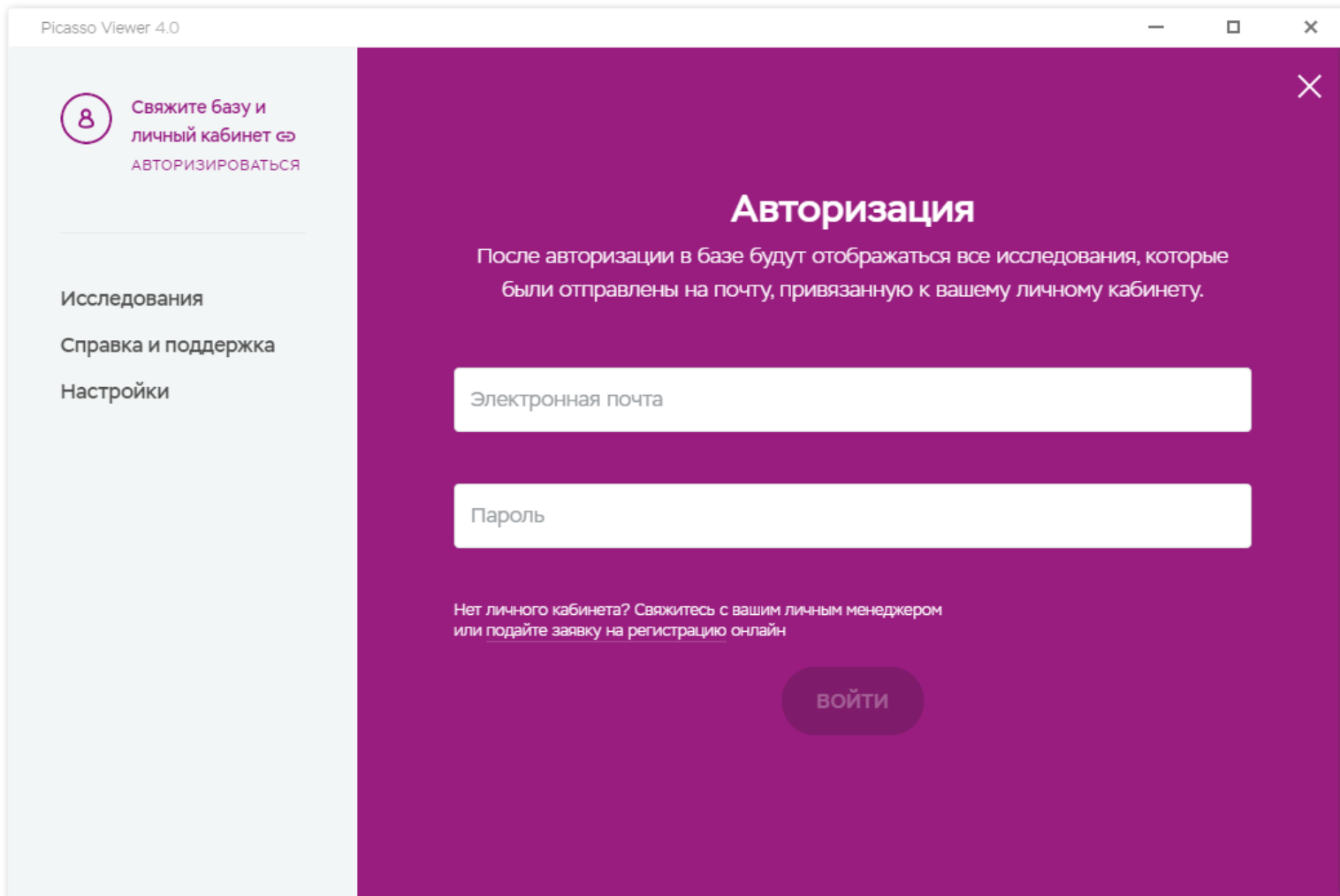

Picasso Viewer 4.0

Свяжите базу и личный кабинет 
АВТОРИЗИРОВАТЬСЯ

Исследования
Справка и поддержка
Настройки

Авторизация

После авторизации в базе будут отображаться все исследования, которые были отправлены на почту, привязанную к вашему личному кабинету.


Электронная почта

Пароль

Нет личного кабинета? Свяжитесь с вашим личным менеджером или [подайте заявку на регистрацию онлайн](#)

ВОЙТИ

4. После синхронизации PicassoViewer с Личным кабинетом появится новая вкладка «из личного кабинета». В данной вкладке будут отображаться исследования, которые были отправлены Вам на электронную почту.

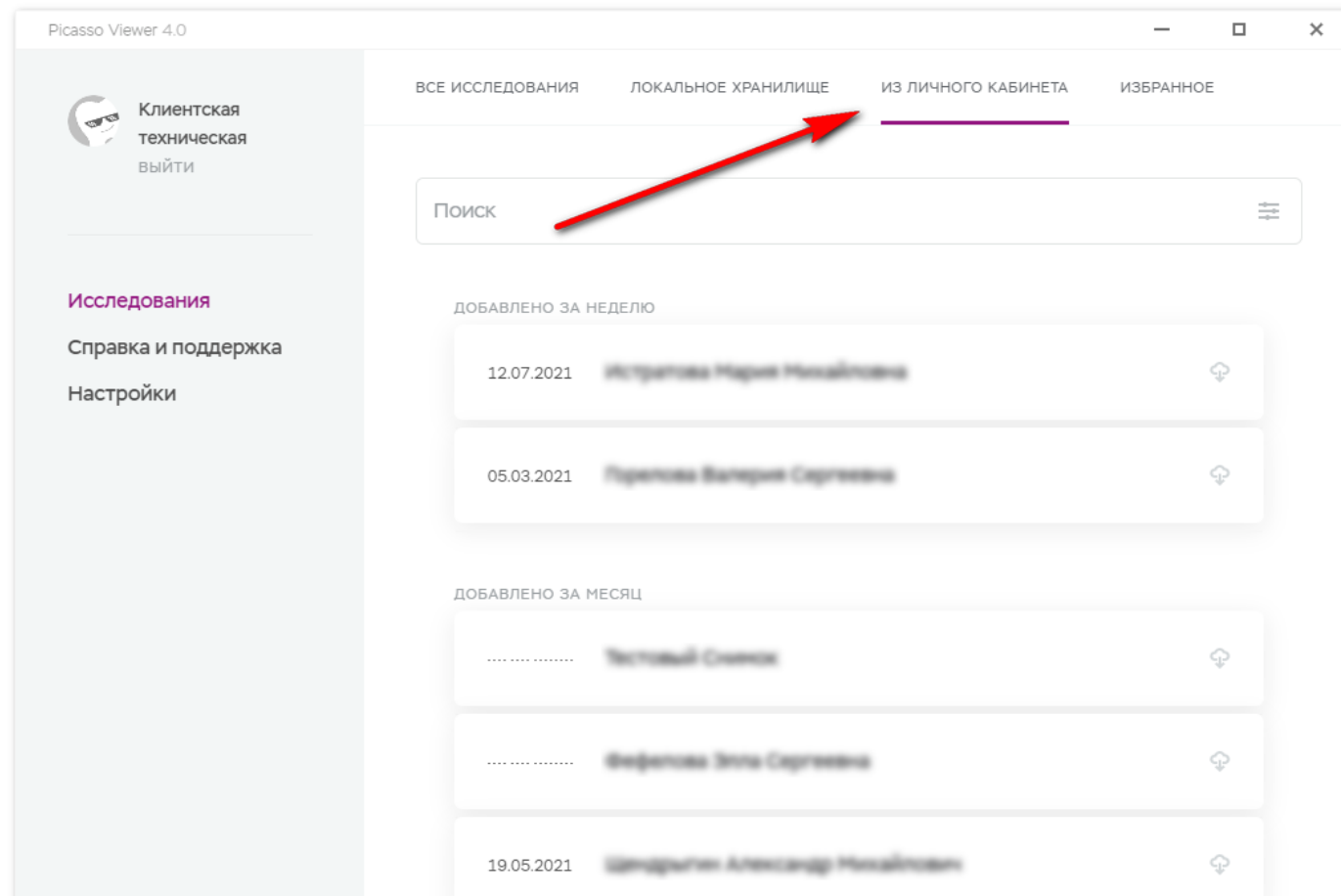

5. Для открытия исследования нужно выбрать пациента и нажать кнопку «Скачать и открыть». Все остальные операции программное обеспечение сделает автоматически.

