



пикассо

Независимые
центры рентгено-
диагностики

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PICASSO VIEWER ПО ССЫЛКЕ

picasso-diagnostic.ru



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуемые системные требования:

- ✓ Процессор: Intel Core i5 или лучше;
- ✓ Оперативная память: DDR 3 8Гб и больше;
- ✓ Не менее 5Gb свободного места на жестком диске;
- ✓ DVD-привод;
- ✓ Монитор с разрешением 1920x1080 или выше;
- ✓ Операционная система Windows 7, 8, 10 (x64);
- ✓ Видео карта дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше;
- ✓ При первичной установке требуются права администратора.

Минимальные системные требования:


- ✓ Процессор: Intel Pentium G серии 2,60 GHz и лучше;
- ✓ Оперативная память: DDR 3 4Гб и больше;
- ✓ Не менее 3Гб свободного места на системном диске;
- ✓ DVD-привод;
- ✓ Монитор с разрешением 1280x1024 (или выше) и глубиной цвета 32 бита;
- ✓ Операционная система: Windows 7 и новее (x86/x64);
- ✓ Интегрированная или дискретная видеокарта;
- ✓ При первичной установке требуются права администратора.

Обратите внимание!

Ваш компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям для работы программного обеспечения PicassoViewer, которое используется для просмотра исследования.

Для установки ПО PicassoViewer, вам необходимо:


1. Открыть письмо, полученное от компании «Пикассо».
2. Нажать кнопку «Скачать исследование».
3. Далее Вы будете переадресованы на [Пикассо Диск](#).

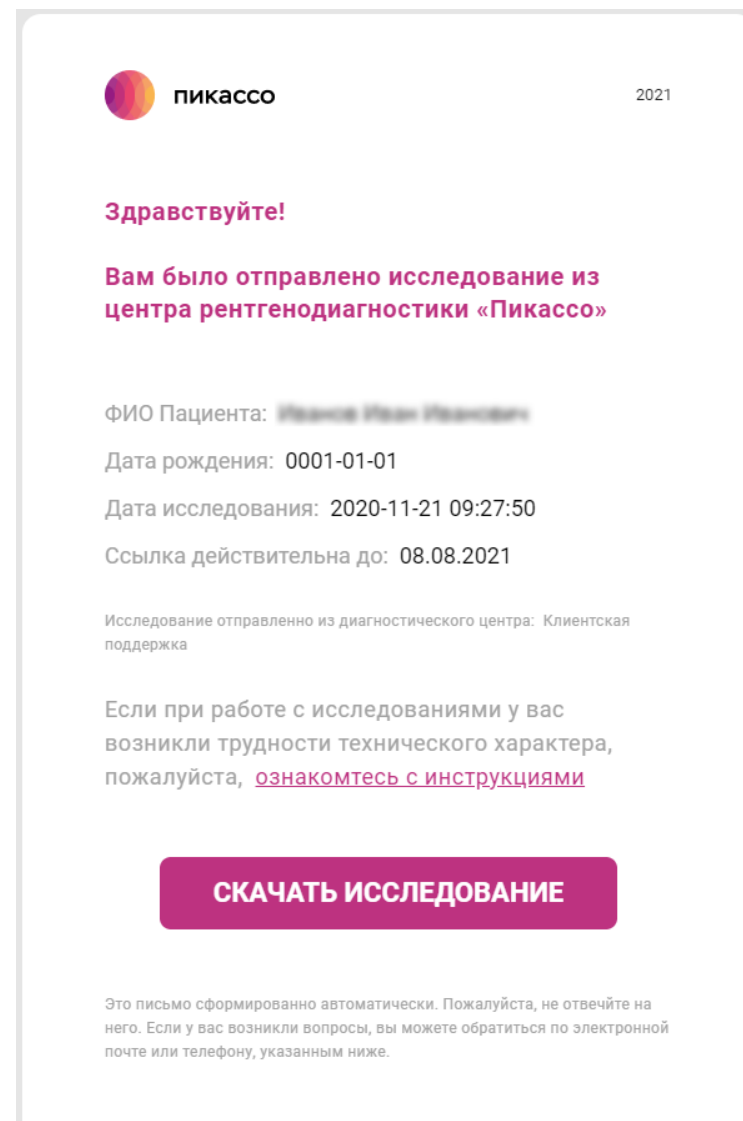

4. После переадресации на [Пикассо Диск](#) откроется ссылка для скачивания исследования.

5. Необходимо нажать кнопку «Скачать».


6. Начнется загрузка исследования.

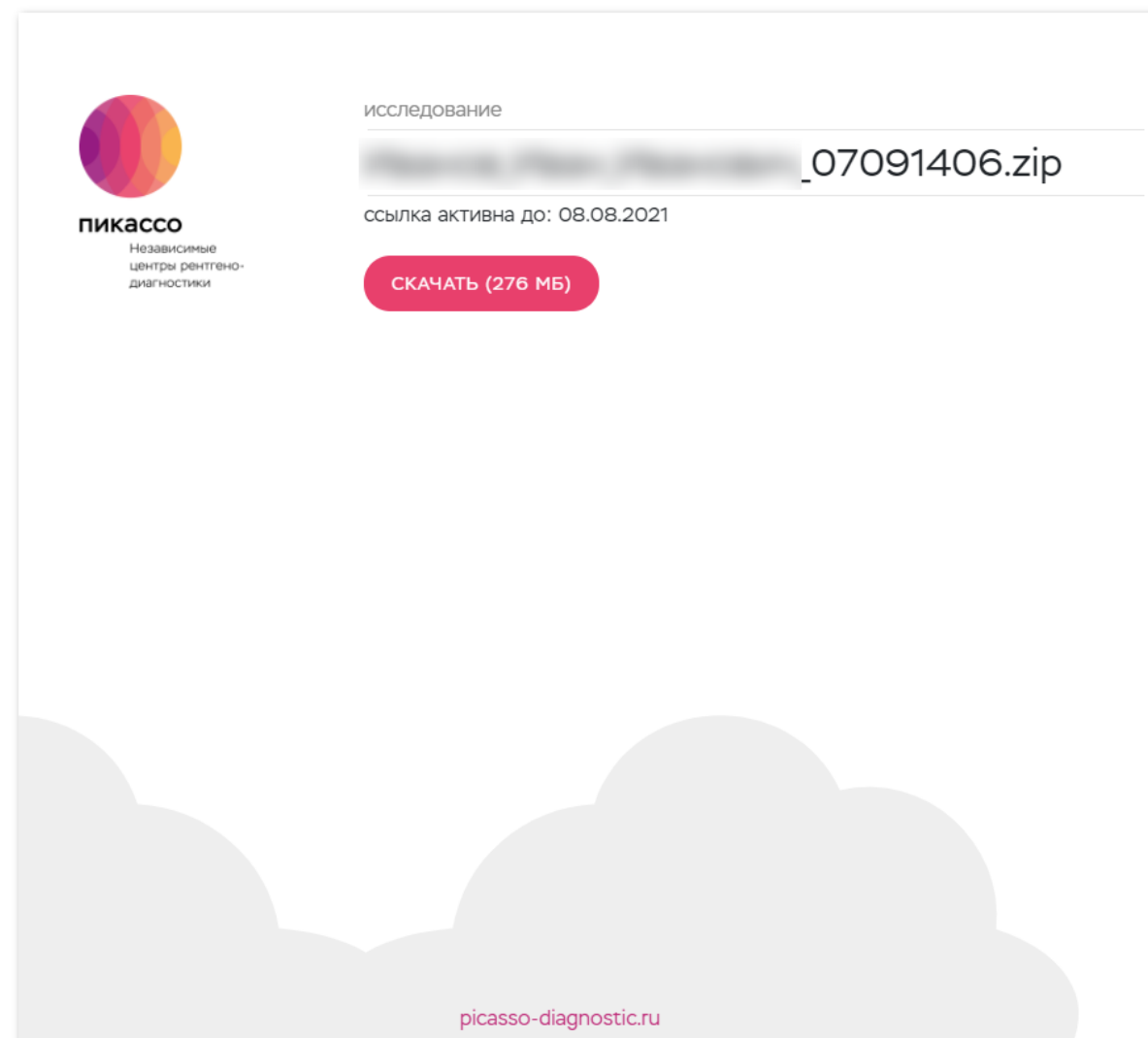

7. Нужно дождаться окончания загрузки исследования по ссылке.

8. По умолчанию все загружаемые из интернета файлы попадают в папку «Загрузки». Для дальнейшей работы с исследованием необходимо запустить «Проводник» и выбрать папку «Загрузки».


9. Далее необходимо выполнить распаковку архива.

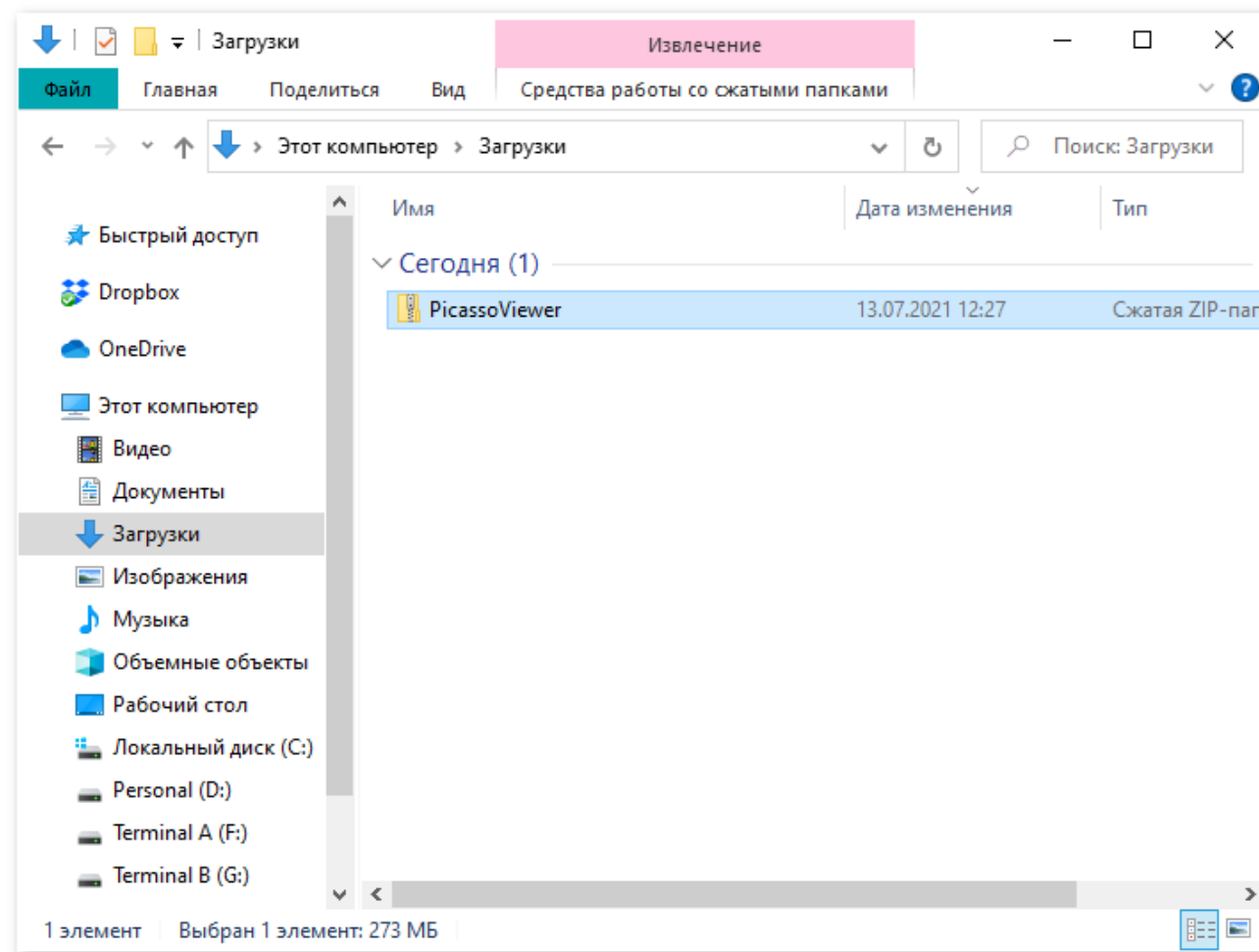

10. Для распаковки файла нужно его выбрать левой кнопкой мыши, далее щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать пункт «Извлечь все...» или «7-Zip» → «Распаковать в «[имя файла исходника]».


Мы рекомендуем использовать для распаковки архивов архиватор 7-Zip. Он является полностью бесплатным и позволяет быстро и без ошибок работать с архивами zip формата. Скачать его можно по ссылке ниже.

<https://www.7-zip.org>

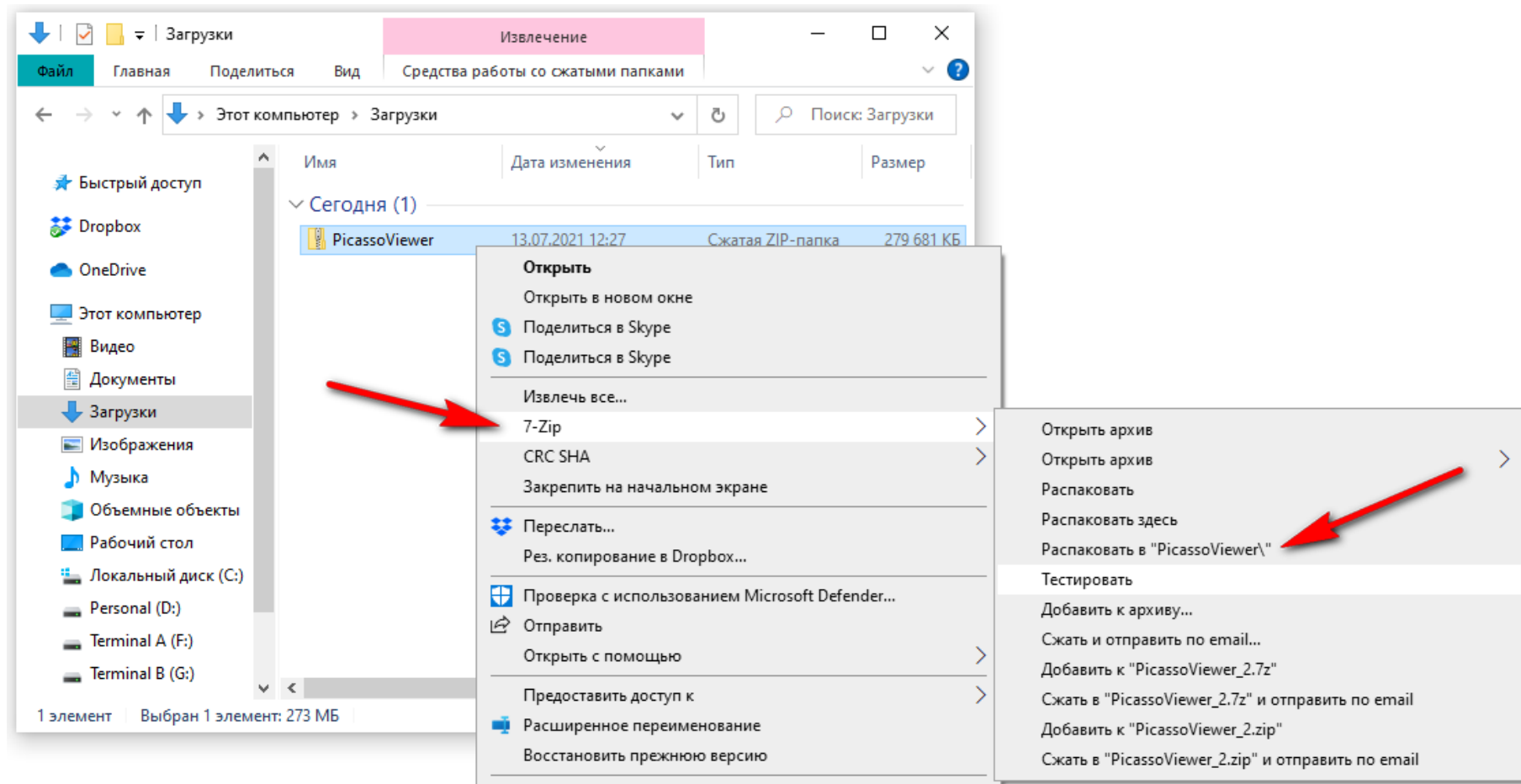


11. После окончания процесса распаковки мы получим папку, которая будет называться также, как и заархивированный файл.

12. Двойным кликом мыши необходимо войти в распакованную папку.

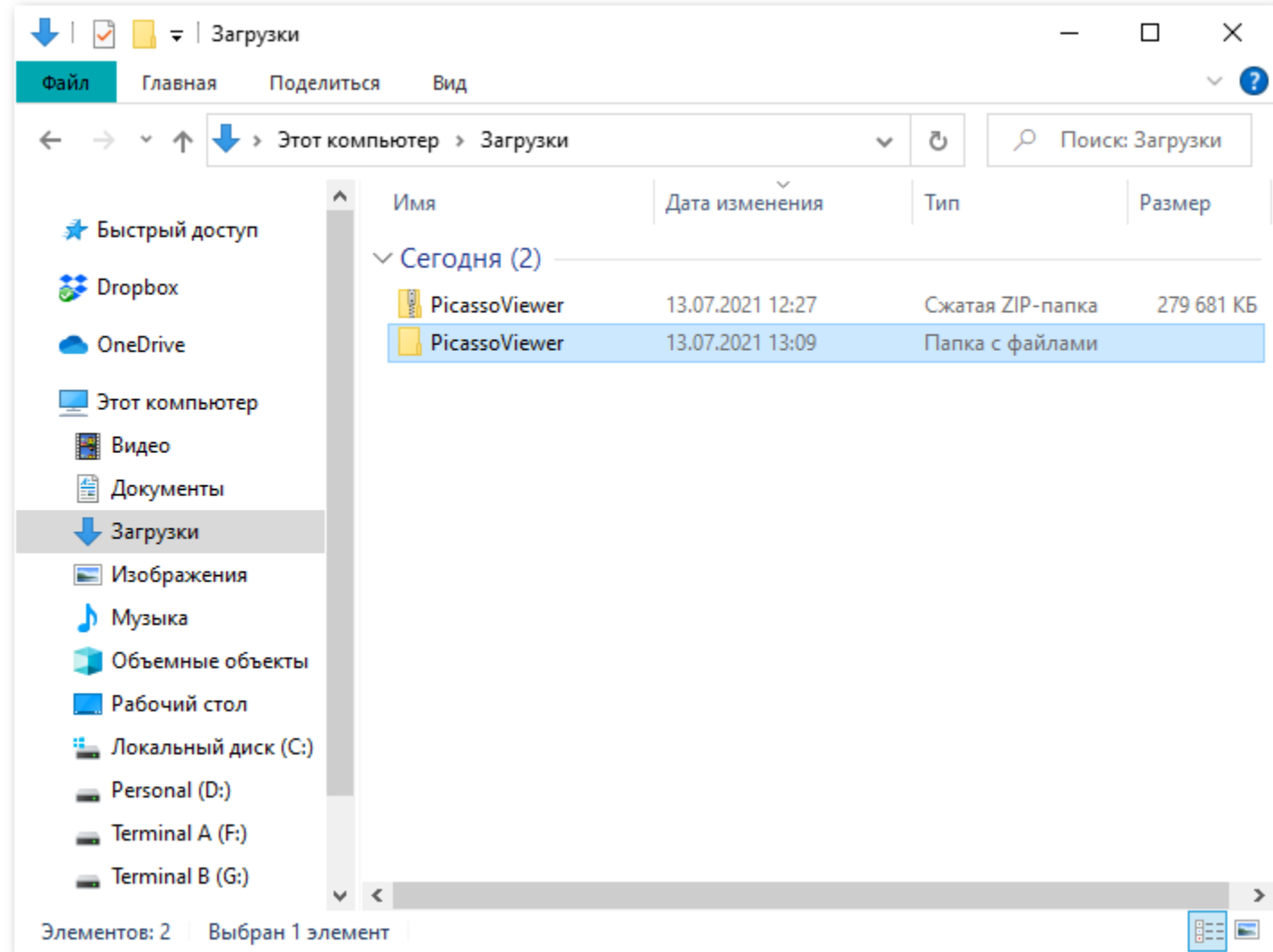


13. Далее необходимо запустить «PicassoViewer». Программа автоматически проверит, установлена ли она на данном компьютере. Если программное обеспечение не установлено, то автоматически запустится процесс установки. Если программное обеспечение уже установлено, то запустится PicassoViewer и можно приступать к работе со снимком.

Для принудительной установки программного обеспечения нужно запустить файл «installer.exe»

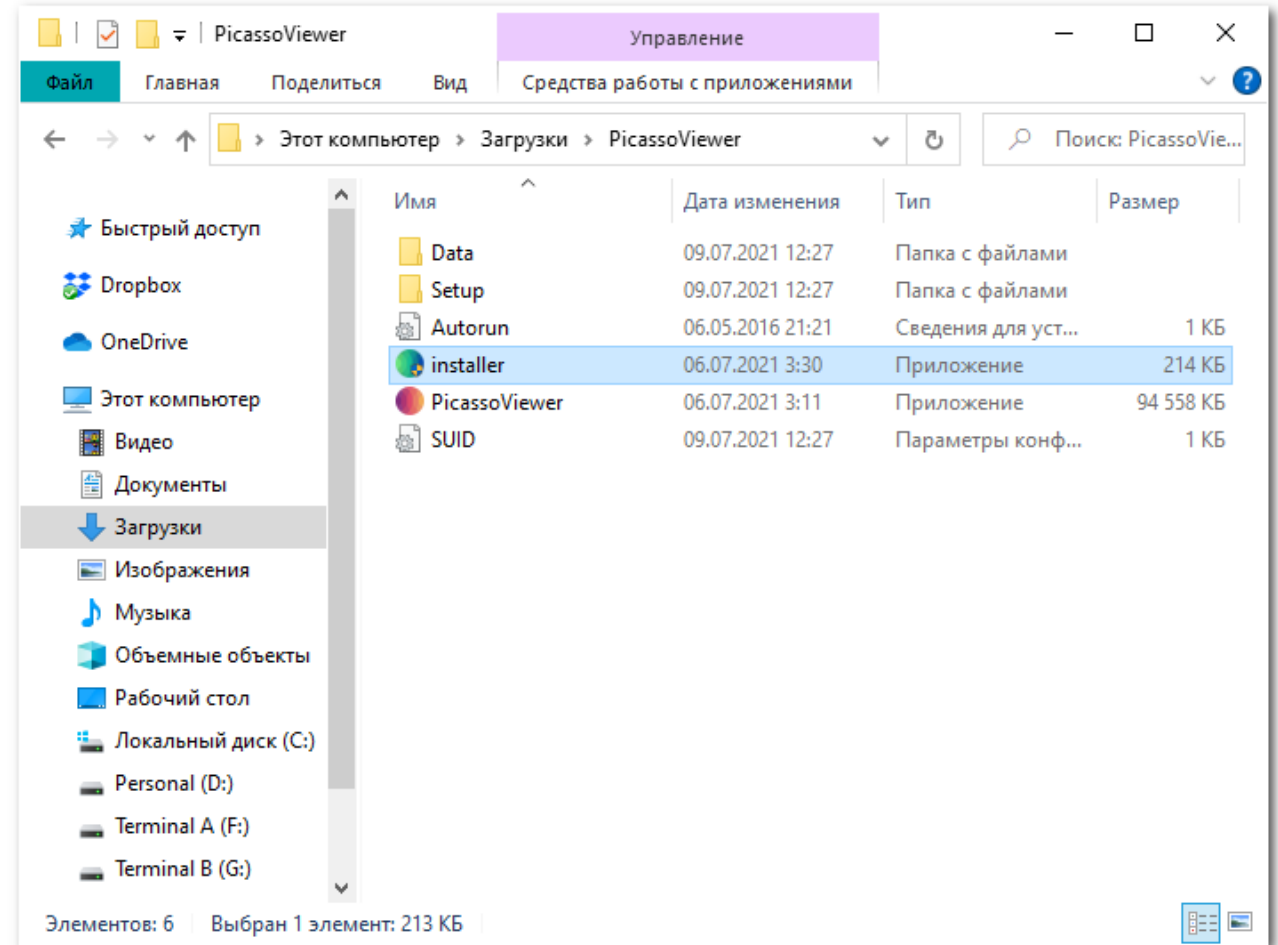




14. Нажимаем кнопку «Далее»

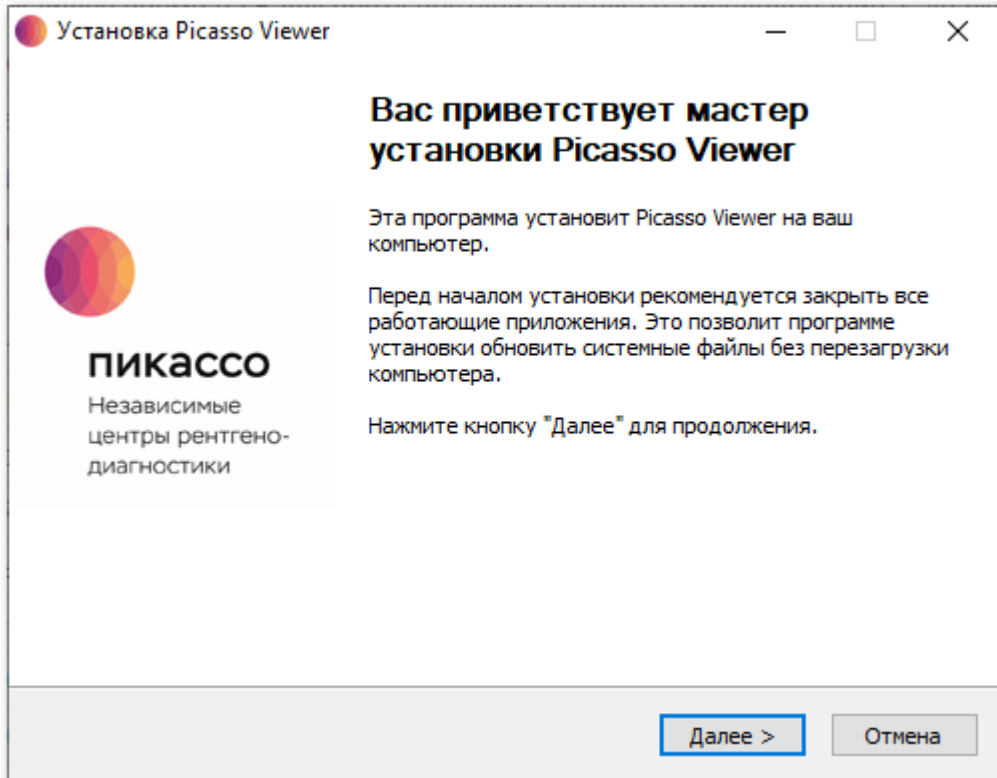


15. Необходимо принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее»

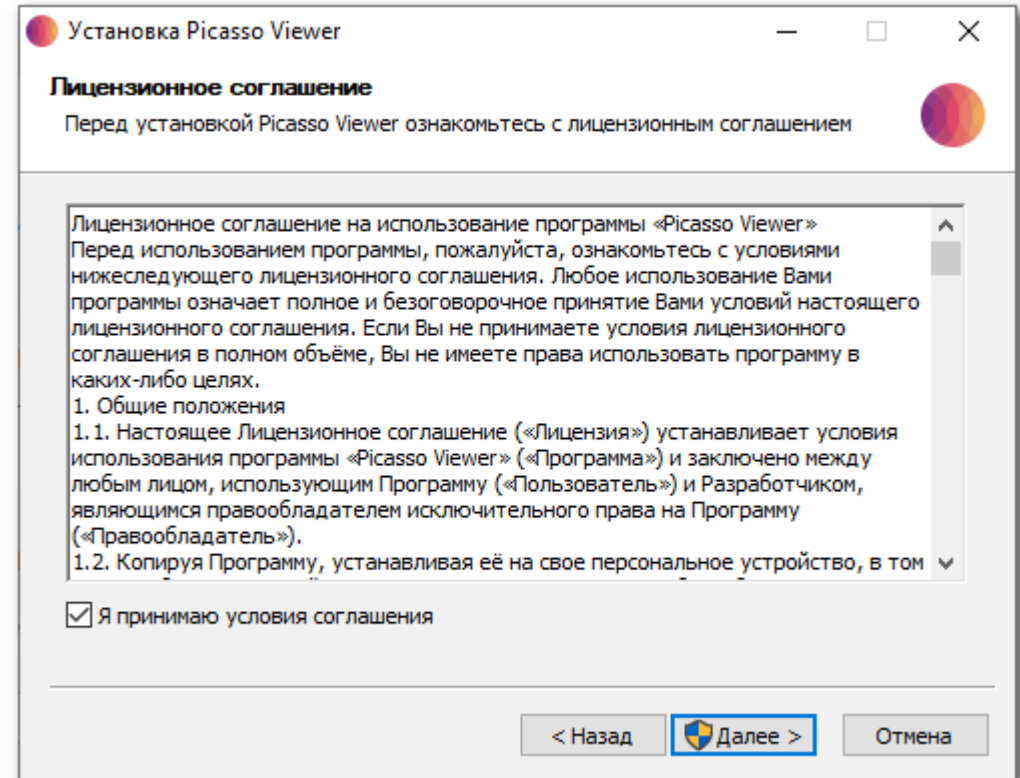




16. Дожидаемся окончания установки программы.

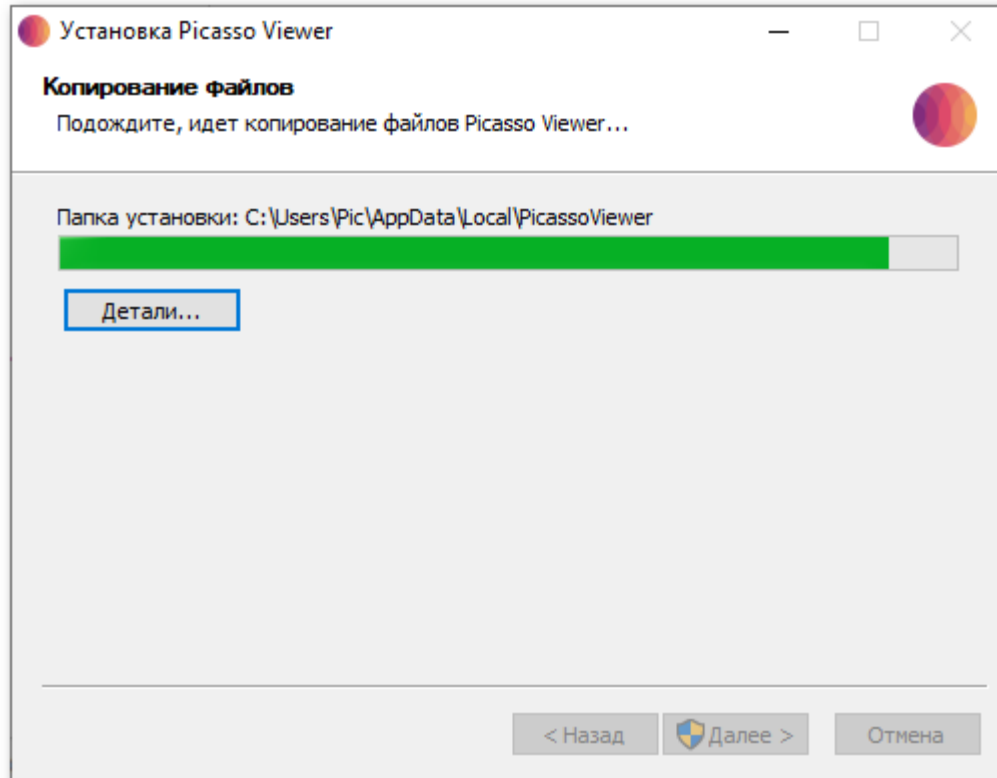

17. После окончания установки необходимых файлов нажимаем кнопку «Готово»

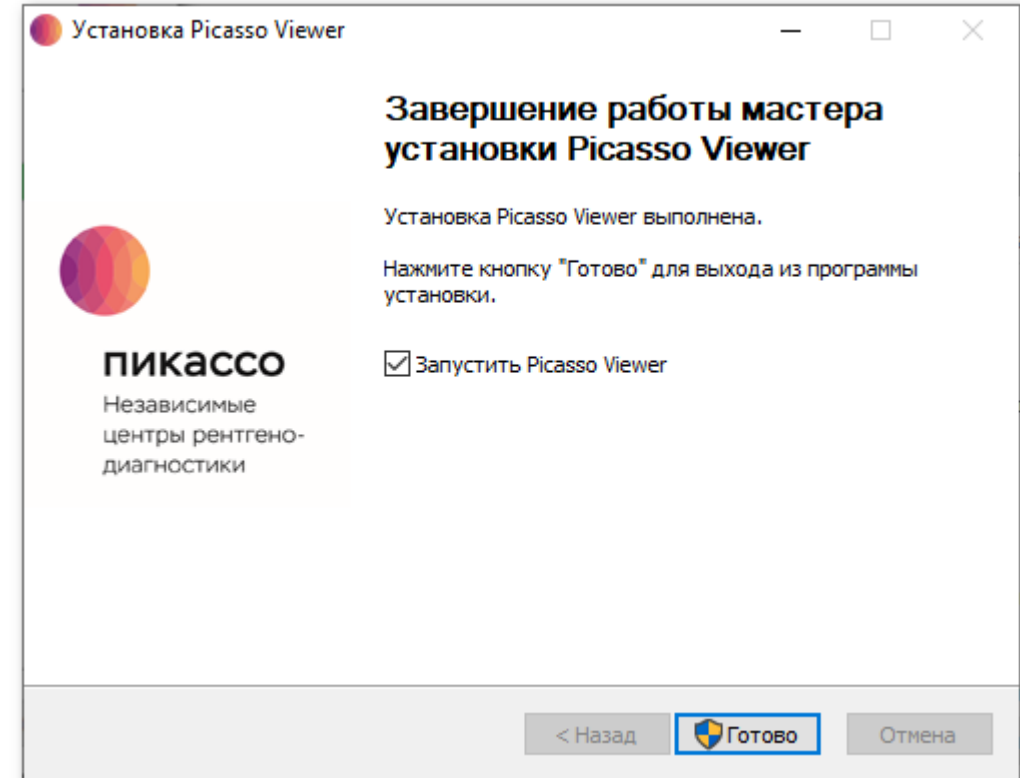



18. Для открытия исследования, наведите курсор мыши на исследование и нажмите «Перенести и открыть»

